



3 in 1

Alle hoest + Keelpijn

Bij droge en vastzittende hoest

Voor de behandeling van:

1. Droge hoest
2. Vastzittende hoest
3. Keelpijn

Lees voor gebruik zorgvuldig de gebruiksaanwijzing en bewaar deze. Bij vragen raadpleeg uw arts.

Doel van gebruik en werking:

Dampo Alle Hoest + Keelpijn is een medisch hulpmiddel gebaseerd op het actieve ingrediënt Polysac-Active™. De siroop is geschikt voor de behandeling van droge en vastzittende hoest, én keelpijn. De siroop biedt directe verlichting en heeft verzachtend effect op de slijmvliezen en de keel. Het vormt een beschermd film laagje achter in de keel, die de geïrriteerde slijmvliezen beschermt en hydrateert en de groei van bacteriën vermindert. Het slijm bij vastzittende hoest wordt losgemaakt, waardoor het makkelijker op te hoesten is. Door de keel te verzachten en de frequentie en ernst van hoest te verminderen wordt de hoestcyclus verbroken.

Samenstelling

Polysac-Active™ (op honing gebaseerd extract), ammonium chloride, water, sucrose, glycerine, natuurlijke citroen smaakstof, propyleenglycol, natuurlijke sinaasappel smaakstof, xanthaangom, cellulosegom, kaliumsorbitaat, natriumbenzoaat, citroenzuur.

Wie kan gebruiken:

Te gebruiken voor kinderen vanaf 2 jaar onder toezicht van volwassenen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor een van de ingrediënten. Niet geschikt voor diabetici. Raadpleeg voor gebruik eerst de huisarts tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Inname en dosering

Goed schudden voor gebruik.


Kinderen van 2-6 jaar: 3-4 keer per dag 5 ml.

Vanaf 6 jaar en volwassenen: 3-4 keer per dag 10 ml.

Zie bijgeleverde maatbeker.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaar in de originele verpakking op kamertemperatuur (15-25°C). Niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum zoals op fles en doosje is aangegeven. Na openen dient het product binnen 3 maanden gebruikt te worden.

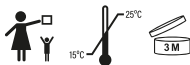

Gebruik de siroop niet:

- Wanneer je overgevoelig bent voor één van de bestanddelen.
- Wanneer je last hebt van chronische hoest (langer dan 3 weken), chronische bronchitis, astma, emfyseem, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), of als er grote hoeveelheden slijm worden opgehoest.
- Wanneer aanhoudende en terugkerende hoest wordt veroorzaakt door maagzuur of maagklachten.

Waarschuwingen en voorzorg

- Alleen voor oraal gebruik.
- Raadpleeg een arts indien:
 - De hoest niet verbetert 5 dagen na start behandeling of verslechtert;
 - Hoest met veel slijmproductie en/of koorts aanhoudt;
 - De hoest langer dan 3 weken aanhoudt;
 - Langdurige heesheid of stemproblemen optreden;
 - Ernstige slikproblemen optreden;
 - Onaangename effecten na gebruik van de siroop optreden.

Wat is hoest?

Hoesten is het meest voorkomende symptoom van ademhalingsstoornissen en functioneert als een afweermecanisme van de luchtwegen. Een hoest gaat vaak gepaard met irritatie en/of ontsteking van de keel, wat kan resulteren in meer hoesten, wat op zijn beurt kan leiden tot verder keelpijn en ongemak. Over het algemeen is hoest verdeeld in natte hoest (ook bekend als vastzittende slijmhoest, waarbij overtollig slijm wordt opgehoest), en droge- of kriebelhoest (welke kan worden geïdentificeerd door een gebrek aan slijm). Het kan moeilijk zijn om het verschil tussen een droge en een natte hoest te herkennen, omdat ze afwisselend of naast elkaar kunnen bestaan.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen

Voor zover bekend kan Alle Hoest + Keelpijn siroop in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt, wanneer gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing. Wij raden je echter aan een arts te raadplegen voordat de siroop in combinatie met geneesmiddelen wordt gebruikt.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Er zijn geen bijwerkingen bekend van Alle Hoest + Keelpijn siroop wanneer deze gebruikt wordt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Vrije Luchtwegen

De luchtwegen zijn belangrijke organen in je lichaam. Gezonde luchtwegen zorgen ervoor dat je goed kan ademhalen. De keel, slijmvliezen en luchtwegen hebben daarmee een zware taak. Hoesten is een natuurlijke manier van het lichaam om de luchtwegen schoon te maken. Dit kan echter vervelend zijn en irritatie geven. Het kan dan wenselijk zijn de slijmvliezen en keel te verzachten en de luchtwegen te verlichten.

Verpakking:

De verpakking bevat een fles van 150 ml € , een gebruiksaanwijzing en een maatbeker.  Medical Brands Developments B.V., Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, the Netherlands.

Distributeur:

Ingroma B.V., Verrijn Stuurtweg 60, 1112 AX Diemen

Voor informatie en inlichtingen:

Ingroma B.V., Verrijn Stuurtweg 60, 1112 AX Diemen, Tel. 0900-1011015. www.dampo.nl.



Datum laatste herziening: April 2019
15OACC.VE.NL.1.00